

# ¡Esté alerta y en el lugar!



¿El área es segura?

¿Los niños están seguros junto a los demás?

¿Se encuentran en una posición adecuada en sus equipos?

¿Se satisfacen las necesidades de cada niño?

## SUPERVISIÓN

Aquí en Rifton somos conscientes de cuán exigente es su trabajo. Además de brindar educación o terapia, debe garantizar un entorno seguro para cada niño. Si bien es importante contar con los equipos y procedimientos apropiados, ninguno de estos reemplaza la presencia de un cuidador atento y responsable.

Cuando se brinden cuidados a niños con necesidades especiales y discapacidades, debe haber uno o más adultos en la habitación junto con los niños en todo momento. A continuación, ofrecemos algunas ideas para capacitar e informar a los cuidadores de su centro.

- **Correas** ¿Las correas y los bloques de posicionamiento están colocados correctamente para garantizar la seguridad del niño? Preste especial atención a las correas y los bloques que se encuentran cerca de la cabeza y el cuello del niño.
- **Comodidad** A medida que pasa el tiempo, ¿el niño sigue estando cómodo o necesita un cambio de posición? Cuando se presenta esta opción, con frecuencia se elige cambiar de posición. Debemos proporcionarles estos cambios durante el día a los niños que necesiten soporte para la postura.
- **Necesidades corporales** ¿El niño necesita un vaso de agua o ir al baño? Debemos ser especialmente conscientes de estas necesidades en el caso de los niños que no puedan comunicarse correctamente.
- **Interacción** ¿Los niños interactúan de manera segura y positiva? Los niños tienen un juicio inmaduro y es posible que se respondan de manera peligrosa. Por ejemplo, un niño con movilidad puede desatar la correa que mantiene a un niño frágil en una posición segura.
- **Entorno** ¿La habitación está bien iluminada y ventilada? ¿Se han eliminado los peligros evidentes?
- **Peligros** El cuidador debe prestar especial atención a actividades como bañarse, que implican el uso de agua, o a situaciones que impliquen la presencia de escalones o escaleras y el niño pueda caerse.

Si bien esperamos que estos puntos hayan sido útiles, no podemos enumerar y analizar todos los peligros en este documento. Es por ello que subrayamos la importancia de contar en todo momento con un cuidador preocupado y atento.