

Z110, Z120, Z130

Rifton HTS

Sistema sanitário higiênico

Manual do produto Z110, Z120 e Z130



Índice


Advertências	3
Uso recomendado e dimensões do item	5
Verificação do pedido	6
Componentes básicos do HTS	6
Bases	8
Suporte para pés	10
Barras de montagem	11
Acessórios	
Assento e almofada para as costas, encosto de cabeça	12
Cinto tipo borboleta	13
Suporte anterior/bandeja	14
Suportes laterais, cinta peitoral	15
Guias de quadril e coletor	16
Defletores e abdutor	17
Descanso para panturrilha e cintas para os tornozelos	18
Suporte para pés, base para banheira	19
Base para portabilidade	20
Operação	21
Manutenção, limpeza e garantia	22
Materiais e modificações de usuário	23


ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente as informações contidas no manual do produto antes de tentar usá-lo. Se os procedimentos e instruções deste manual não forem seguidos, podem ocorrer ferimentos graves ou até a morte.
- Um profissional qualificado deve avaliar a adequação e segurança de todos os equipamentos para cada usuário.
- Este produto é destinado ao uso por clientes de julgamento incerto. A supervisão de um adulto é necessária em todos os momentos.
- Para evitar quedas e lesões:
 - ◇ Não use este produto em terreno acidentado e irregular, perto de piscinas ou próximo a escadas.
 - ◇ Garanta o uso adequado das cintas e suportes a todo momento. As cintas e os suportes oferecem segurança ao usuário e devem ser ajustados cuidadosamente para proporcionar conforto e segurança.
 - ◇ Aperte todos os botões de ajuste antes da utilização e imediatamente após fazer qualquer ajuste.
- Para evitar quedas, estrangulamento, ficar com a cabeça presa ou outras lesões:
 - ◇ Sempre use o cinto de segurança quando a bandeja, cinta peitoral ou encosto de cabeça estiverem em uso.
 - ◇ Ajuste a parte do cinto de segurança do cinto tipo borboleta antes de apertar as cintas superiores.
- A base portátil é destinada apenas para uso em viagens e não deve ser utilizada como base principal. Garanta estabilidade adequada ao usar a base portátil.
- Não use este produto para clientes fora dos limites de altura e peso especificados neste manual.
- Para evitar falha estrutural, que pode resultar em lesões graves ou morte:
 - ◇ Verifique regularmente se este produto apresenta parafusos soltos ou ausentes, fadiga de metal, rachaduras, soldas quebradas, falta de acessórios, instabilidade geral ou outros sinais de desgaste excessivo.
 - ◇ Não utilize este produto na presença de qualquer condição que possa tornar sua operação não segura.
 - ◇ Não use componentes ou produtos Rifton para qualquer outra finalidade diferente da prevista.
 - ◇ Substitua ou repare componentes ou produtos danificados ou que pareçam instáveis.
 - ◇ Use somente peças de reposição autorizadas Rifton.

Símbolos para usuários

Use estes símbolos para determinar quais seções deste manual são relevantes para você.

 **Usuários técnicos** Para profissionais que fazem o pedido e configuram produtos Rifton.

 **Usuários domésticos** Para profissionais da saúde que usam produtos Rifton regularmente.

 **Equipe de manutenção** Para pessoas responsáveis pela manutenção ou pedidos de produtos e peças Rifton.

IMPORTANTE

- Guarde este manual para consultas futuras. Cópias adicionais estão disponíveis em www.rifton.com

Uso recomendado

Rifton HTS é um dispositivo médico de Classe 1. O intuito do HTS é compensar doenças, lesões ou deficiências, ao permitir o uso do sanitário e banhos de forma mais confortável e oferecer modificação para posicionamento anatômico. O HTS pode ser eficiente do ponto de vista médico ao promover os processos fisiológicos necessários para obter movimentos eficientes do intestino e da bexiga e para cuidar da higiene de crianças e adultos com deficiência.

As diversas opções de configuração do HTS proporcionam grande versatilidade; ele pode ser usado de forma independente, sobre o vaso sanitário, montado diretamente no vaso sanitário, em um chuveiro ou banheira. Suportes e acessórios opcionais permitem que o HTS seja usado por clientes com diversas necessidades e deficiências.

Dimensões do usuário e do item

Dimensões do usuário - polegadas (cm)	Z110 pequeno	Z120 médio	Z130 grande
Altura	30-46 (76-117)	42-56 (106-142)	50-74 (127-188)



Dimensão principal do usuário: altura

A altura geral do usuário é um guia geral para ajudá-lo a selecionar o tamanho adequado de HTS. Escolha o modelo que permite o crescimento.

Importante: Verifique se a largura, profundidade e altura do assento são adequadas para cada usuário e se o peso do usuário não excede o máximo recomendado.

Faixa de medição - polegadas (cm)	Pequeno	Médio	Grande
Largura total	21,25 (54)	21,25 (54)	23,5 (60)
Assento (frontal) à altura do suporte para pés*	8-13 (20-33)	10-15 (25-38)	13-18 (33-46)
Assento (frontal) ao chão; estrutura de inclinação móvel	15-21,5 (38-55)	15-21,5 (38-55)	17-22,5 (43-57)
Assento (frontal) ao chão; estrutura sem inclinação móvel	15,4-20 (39-51)	15,4-20 (39-51)	18-22 (46-56)
Assento (frontal) ao chão; estrutura fixa sem inclinação	12,5-17 (32-43)	12,5-17 (32-43)	15-19 (38-48)
Profundidade do assento	8/9/10/11 (20/23/25/28)	11,5/12,5/13,5/14,5 (29/32/34/37)	14,5/15,5/16,5/17,5 (37/39/42/44)
Largura do assento	8/10/12 (20/25/30)	10/12/14 (25/30/36)	13/15/17 (33/38/43)
Altura do apoio de braços	5,75 (14,5)	7 (18)	8,75 (22)
Altura do encosto acima do assento	16,5 (42)	19,5 (50)	24,5 (62)
Largura do encosto	11,5 (29)	13,5 (34)	16 (41)
Inclinação no espaço PARA A FRENTE	15°	15°	15°
Inclinação no espaço PARA TRÁS	15°	15°	15°
Ajuste do ângulo do encosto	6° para a frente, 6° e 18° para trás	6° para a frente, 6° e 18° para trás	6° para a frente, 6° e 18° para trás
Peso da estrutura - lb (kg)	15 (7)	27½ (13)	45 (20)
Altura livre máxima abaixo do assento (estrutura de inclinação)	19 (48)	19 (48)	20 (51)
Carga de trabalho máxima - lb (kg)	75 (34)	150 (68)	250 (113)

* Quando a base móvel está em posições mais baixas e o suporte para pés completamente estendido, os rodízios frontais podem não girar. Neste caso, altere o ângulo do suporte para pés ou aumente a altura do assento para que os rodízios possam girar.

Verificação do pedido

Rifton HTS foi enviado de acordo com suas especificações. Ele não precisará de ferramentas para a montagem. Siga estas instruções para garantir que o produto seja montado e usado corretamente. Este manual de produto é abrangente e pode abordar recursos não incluídos em sua configuração do HTS.

Se o envio estiver incompleto ou danificado, entre em contato com o Atendimento ao Cliente pelo número 800.571.8198.

Componentes básicos do HTS

Um *Guia de referência rápida* do HTS pode ser baixado de um código QR localizado na parte de trás do encosto de cabeça.

Aviso: Todas as alavancas ou botões azuis indicam um ponto de ajuste.

Profundidade do assento

As peças laterais permitem o ajuste da profundidade do assento. Levante as travas azuis em ambos os lados externos (figura 6a), mova os dois lados juntos até a profundidade desejada e ache uma posição de encaixe.

Este mesmo ajuste também permitirá que ambos os lados deslizem para fora do assento para deixar livre a parte inferior.

Ângulo do encosto

O ângulo do encosto pode ser ajustado a 6° para a frente e 6° e 18° para trás (figura 6b). Levante as alavancas de ângulo traseiro, ajuste conforme desejado e solte-as em uma posição de encaixe (figura 6c).



Figura 6a



Figura 6b



Figura 6c

Remoção ou instalação do encosto

Para instalar o encosto: Incline o encosto para a frente (figura 7a). Insira a extremidade inferior do encosto entre as linguetas metálicas e levante as alavancas de ângulo do encosto. Pressione firmemente o encosto para baixo e gire-o para trás em direção à primeira posição de travamento.

Para remover o encosto, ajuste o ângulo traseiro todo para frente. Em seguida, levante o encosto.

Cinto de segurança

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas, estrangulamento, ficar com a cabeça presa e outras lesões, SEMPRE use o cinto de segurança quando a bandeja, cinta peitoral ou encosto de cabeça estiverem em uso.

Todo HTS vem com um cinto de segurança. Para prender o cinto de segurança, insira o grampo (figura 7b) no encaixe na extremidade posterior da lateral da peça. Verifique se o cinto de segurança trava no local.

Usuários que geralmente precisam deslizar para a frente do assento, podem se beneficiar ao enrolar o cinto de segurança dentro dos suportes do encosto (figura 7c).

No HTS pequeno, há uma opção adicional para enrolar o cinto de segurança e garantir um posicionamento mais seguro para usuários com pouca capacidade de movimento. O cinto pode ser enrolado nos ganchos da extremidade inferior traseira do assento (figura 7d).



Figura 7a



Figura 7b



Figura 7c



Figura 7d

Apoio de braços

Para prender o apoio de braços, insira a parte inferior do apoio nas ranhuras ovais das peças laterais e pressione firmemente para baixo até que o mesmo encaixe no lugar (figura 7e).

Para remover o apoio de braços, pressione o botão de liberação (A) e puxe o apoio para cima.

Aviso: Apoios de braços de diferentes tamanhos podem ser instalados.



Figura 7e

Bases

ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas e lesões, sempre verifique se ambos os ganchos do assento estão presos nos encaixes da base e se as travas do assento estão travadas na base.

Colocação do assento

Insira ambos os ganchos na parte posterior do assento nos encaixes da estrutura (figura 8a). Empurre a parte da frente do assento para baixo até ouvir o encaixe da trava.

Remoção do assento

Para remover o assento de uma base, puxe ambas as travas do assento em direção à extremidade anterior do assento (figura 8b) e levante-o da base.



Figura 8a



Figura 8b

Ajuste da altura da base

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas e lesões, não ajuste a altura com o usuário no produto.

Para abaixar o assento, aperte as alavancas de altura nas colunas da estrutura (figura 8c) enquanto suporta o peso do assento. Abaixei os dois lados de maneira uniforme para não emperrar.

Para levantar o assento, vire o suporte para pés para cima, coloque um pé na barra transversal e empurre a estrutura do assento (não é necessário liberar as travas de altura).

Aviso: Se o ajuste parecer apertado, tente com o espaço de inclinação para a frente ou para trás.

Ajuste do espaço de inclinação

O ajuste do espaço de inclinação está disponível nas bases Z122 e Z132. Use a alavanca de inclinação da parte posterior direita do assento (figura 9a) para liberar as duas molas a gás. A inclinação se ajusta a 15° para a frente e 15° para trás. É fácil inclinar o HTS com o usuário no produto.

Rodízio e pés fixos

Os rodízios e pés fixos de borracha podem ser substituídos ou trocados facilmente. Basta puxar a haste do rodízio ou pé de borracha para fora da tampa. Verifique se os rodízios ou pés de reposição foram inseridos completamente (figura 9b).

Freios do rodízio

Para frear, pise na alavanca de freio. Para soltar o freio, levante a alavanca (figura 9c).



Figura 9a



Figura 9a

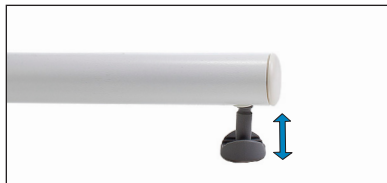


Figura 9b



Figura 9c

Suporte para pés

⚠ CUIDADO

Para evitar quedas, inclinações ou outras lesões não exceda 150 libras (68 kg) no suporte para pés.

O suporte para pés é fornecido com bases móveis.

Ajuste de altura

Para ajustar a altura do suporte para pés, pressione os dois botões de altura, mova o suporte para pés até a altura desejada e em seguida solte os botões em uma posição travada (figura 10a).

Ajuste do ângulo do suporte para pés

O ângulo do suporte para pés pode ser ajustado ao empurrar as duas alavancas de ângulo para cima e movendo o suporte para pés no ângulo desejado (figura 10b).

O suporte para pés pode ser dobrado para cima para facilitar transferências ao nível do chão (figura 10c).



Figura 10a



Figura 10b



Figura 10c

Barras de montagem

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas ou lesões, verifique se o vaso sanitário está bem preso ao chão e se os parafusos do assento estão em boas condições antes de prendê-lo à barra de montagem. Verifique a estabilidade do vaso sanitário e os parafusos do assento em intervalos regulares quando a barra de montagem estiver em uso.

Há dois tipos de barras de montagem, que se adaptam aos vasos sanitários padrão e aos alongados (figura 11a).

A barra de montagem é presa com os parafusos que seguram o assento e oferece um ponto de fixação firme para o assento e unidades traseiras (figura 11b).

Aviso: Para determinar qual tipo de barra de montagem é necessária, meça do eixo dos parafusos do assento à extremidade dianteira da bacia de porcelana. Use uma barra de montagem para vaso sanitário padrão se a medida for de 17" (43 cm) ou menos, caso contrário use a barra de montagem para vaso sanitário alongado.

Ajuste do assento à barra de montagem

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas ou lesões, verifique se os dois ganchos estão bem presos nos encaixes da barra de montagem antes de usar o HTS.

Para preencher o assento na barra de montagem, incline-o ou deslize-o para a frente. Em seguida insira os dois ganchos do assento nos encaixes da barra de montagem e abaixe o assento até o vaso sanitário (figura 11c).



Figura 11a



Figura 11b



Figura 11c

Acessórios

Assento e almofadas para as costas

O assento e as almofadas para as costas são removíveis para limpeza. Eles são feitos de poliuretano com uma camada durável.

Há dois modelos de almofada para assento. Um deles tem uma abertura mais larga na parte de trás para facilitar a higiene (figura 12a). O outro tem uma abertura mais estreita, fechada na parte posterior, que proporciona mais suporte ao usuário (figura 12b).

O assento e as almofadas para as costas têm quatro encaixes presos nos orifícios do assento e do encosto (figura 12c).



Figura 12a



Figura 12b

Encosto de cabeça

ADVERTÊNCIA

Para evitar ficar com a cabeça presa ou outras lesões, sempre use o cinto de segurança quando o encosto de cabeça estiver em uso.



Figura 12c

Para prender e ajustar a altura do encosto de cabeça, pressione o botão de altura (A). Insira a haste do encosto de cabeça na ranhura (figura 12d) na altura desejada. Solte o botão e ajuste a altura até ouvir o encaixe.

Para ajustar a profundidade e o ângulo do encosto de cabeça, solte as alavancas ovais (B), ajuste na posição desejada e aperte novamente as alavancas.

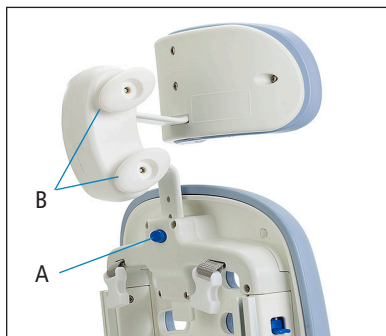


Figura 12d

Cinto tipo borboleta

ADVERTÊNCIA

- Para evitar quedas, estrangulamento ou outras lesões:
 - ◇ Ajuste a parte do cinto de segurança do cinto tipo borboleta antes de apertar as cintas superiores.
 - ◇ Verifique o cinto após cada ajuste.

Para prender o cinto tipo borboleta, remova a seção central do cinto de segurança (A). Substitua-a pelo cinto tipo borboleta (B), que tem um cinto de segurança embutido (figura 13a).

Ajuste a tensão do cinto de segurança e prenda as alças para os ombros nos encaixes do encosto (figura 13b).

Para usuários pequenos, pode ser necessário prender a alça para ombros na ranhura superior do encosto (figura 13c).

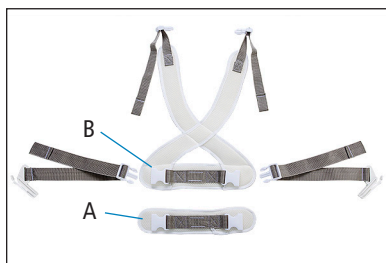


Figura 13a



Figura 13b

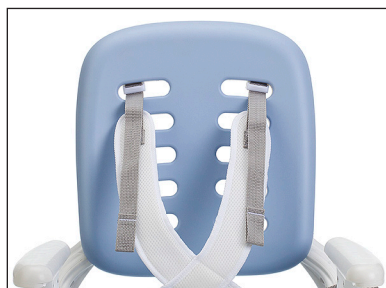


Figura 13c

Suporte anterior/bandeja

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas, estrangulamento ou outras lesões, sempre use o cinto de segurança quando a bandeja estiver em uso.

O suporte anterior tem uma superfície estofada para que o usuário possa se encostar, proporcionando uma posição inclinada excelente para a frente com o tronco e os braços suportados pela bandeja (figura 14a).

Para ajustar a profundidade da bandeja, aperte a trava sob a parte dianteira da bandeja (figura 14b).



Figura 14a

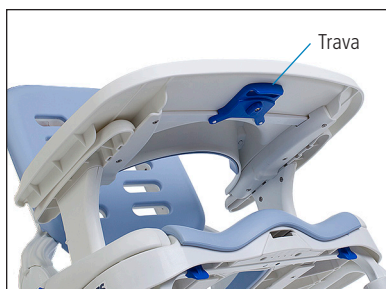


Figura 14b

Suportes laterais

Os suportes laterais estão disponíveis com ou sem uma cinta peitoral para segurar o tronco em posição vertical. Eles devem ser ajustados separadamente, na altura, ângulo e largura usando a alavanca (B) atrás do encosto.

Para prender e/ou ajustar o suporte lateral (A), solte a alavanca (B) e insira a chave (C) no orifício (D) na parte de trás do encosto. Ajuste a altura, o ângulo e a largura da lateral ao corpo do cliente deslizando o suporte lateral para cima e para baixo, deslizando o suporte (E) na ranhura e girando o suporte (E) ao redor da alavanca. Quando o ajuste desejado for alcançado, prenda a alavanca firmemente (figura 15a).

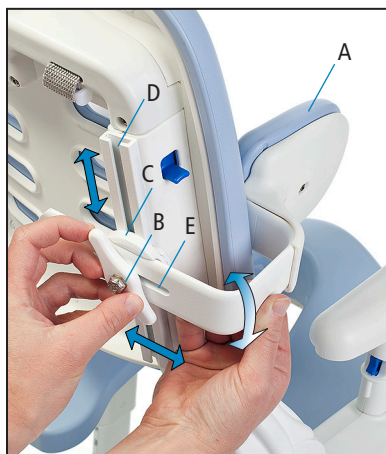


Figura 15a

Cinta peitoral

ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas, estrangulamento ou outras lesões:

- Sempre use o cinto de segurança quando a cinta peitoral estiver em uso.
- Sempre verifique se a cinta peitoral está ajustada corretamente.



Figura 15b

A cinta peitoral é presa nos suportes laterais como mostrado (figura 15b). A cinta peitoral deve ser presa na parte interna dos suportes laterais (figura 15c).



Figura 15c

Guias de quadril

A largura do assento pode ser ajustada com um par de guias de quadril que são presas aos apoios de braços. Na primeira posição elas reduzem a largura do assento em 2" (5 cm) e na segunda posição reduzem em 4" (10 cm) (figura 16a).

Deslize a guia de quadril no apoio de braços com a fenda da guia para cima e para trás. Insira o apoio de braços na ranhura através da guia de quadril.



Figura 16a

Coletor

O coletor (figura 16b) permite que o HTS seja usado como um vaso sanitário. Insira o coletor nos trilhos sob o assento, da parte de trás da cadeira. Empurre até encaixar no lugar. Remova-o puxando para trás (figura 16c).



Figura 16b



Figura 16c

Defletores

O **defletor padrão** é inserido na ranhura da almofada do assento com a cavidade voltada para o usuário (figura 17a).

O **protetor anti-respingos** proporciona ainda mais cobertura. Ele é colocado contra o usuário com o cinto de segurança ou cinto tipo borboleta (figura 17b).

Adutor

Aviso: Adicionar o adutor ao defletor padrão confere estabilidade ao defletor.

O adutor estofado é colocado na ranhura na extremidade da frente do assento. Ele pode ser removido apertando a alavanca azul (A) e o puxando para fora (figura 17c).

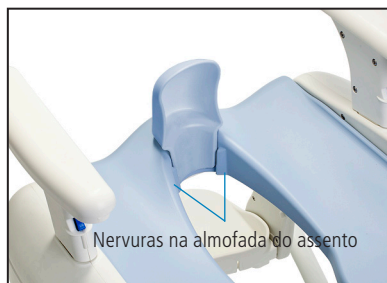


Figura 17a



Figura 17b

Aviso: Após cada utilização, limpe com toalhas desinfetantes ou com uma solução de até 10% de água sanitária.

Remova as almofadas de poliuretano para limpar com água e sabão ou um desinfetante suave.



Figura 17c

Descanso para panturrilha

Essa opção requer o uso de um suporte para pés.

O descanso para panturrilha é encaixado acima do suporte para pés (figura 18a). Ele deve ser removido se o suporte para pés estiver elevado.

O descanso para panturrilha é encaixado nas hastes do suporte para pés. Com o tecido na parte de trás e os cantos arredondados para baixo, amarre o tecido nas hastes e no anel de metal na parte da frente, prendendo o gancho e o laço firmemente ao redor das hastes (figura 18b).



Figura 18a



Figura 18b

Cintas para o tornozelo

Essa opção requer o uso de um suporte para pés.

Para prender as cintas para tornozelo, insira a guia de tecido na ranhura horizontal na parte de trás do suporte para pés (figura 18c).

Vire o tecido e deslize-o na ranhura vertical e puxe-o para prender (figura 18d).



Figura 18c



Figura 18d

Aviso: As cintas com gancho e os fechos podem ser lavados. Encaixe os fechos antes de lavar. Não passe a ferro.

Suporte para pés para colocar a barra de montagem

CUIDADO

Para evitar quedas, inclinações ou outras lesões não exceda 150 libras (68 kg) no suporte para pés.

Como colocar o suporte para pés no HTS quando usado em um vaso sanitário com uma barra de montagem (figura 19b):

1. Vire o assento do HTS de cabeça para baixo (figura 19a).
2. Insira as pequenas abas de metal na extremidade do tubo de metal no suporte para pés (A), nas ranhuras na parte de trás do assento.
3. Empurre o suporte para pés firmemente para baixo para encaixar no tubo quadrado nas travas azuis (B).
4. Prenda o HTS na barra de montagem (consulte a página 11).

Os outros ajustes para o suporte para pés são os mesmos descritos na página 10.

Base para banheira

ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas e lesões, sempre verifique se ambos os ganchos do assento estão presos nos encaixes da base e se as travas do assento estão travadas na base.

A base para banheira deve ser usada em uma banheira para dar banho no cliente (figura 19c).

Colocação do assento

Insira os dois ganchos da parte de trás do assento nas ranhuras da estrutura da base para banheira (figura 19d). Empurre a parte da frente do assento para baixo até ouvir o encaixe da trava.

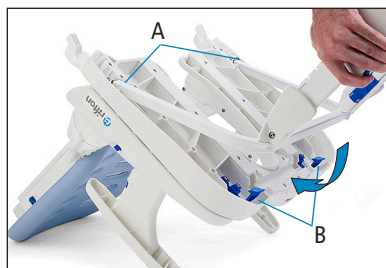


Figura 19a



Figura 19b



Figura 19c



Figura 19d

Base de portabilidade com bolsa de transporte

ADVERTÊNCIA

Para evitar quedas e lesões:

- A base portátil é destinada apenas para uso em viagens e não deve ser utilizada como base principal. Garanta estabilidade adequada ao usar a base portátil.
- Verifique se as duas partes da estrutura estão encaixadas firmemente antes de prender o assento.
- Sempre verifique se os ganchos do assento estão presos nos encaixes da base e se as travas da parte da frente estão encaixadas na base.



Figura 20a



Figura 20b

A **base de portabilidade** é uma estrutura leve e dobrável com uma bolsa de transporte (figura 20a). Esta base se encaixa no bolso traseiro da bolsa de transporte.

O assento, encosto, apoio de braços e outros acessórios podem ser colocados no bolso dianteiro da bolsa de transporte (figura 20b).



Figura 20c

Para montar a base, desdobre as duas metades da estrutura, insira o pino quadrado de uma das metades no tubo da outra metade da estrutura (figura 20c). Verifique se as duas peças da estrutura estão completamente encaixadas antes de prender o assento.

Prenda o assento na estrutura (figura 20d) como descrito nas páginas anteriores (figura 19d).



Figura 20d

Operação

Rifton HTS tem duas funções principais; usar o vaso sanitário e tomar banho.

Para **usar o vaso sanitário**, a posição ideal é a inclinação do tronco para a frente com o ângulo do quadril fechado. Essa posição pode ser obtida com o HTS ao ajustar o ângulo do encosto ligeiramente para a frente, ajustando o assento ligeiramente para trás, usando o suporte anterior para apoiar o tronco e os braços e elevando o suporte para pés para que os mesmos fiquem bem apoiados (figura 21a).

Para **tomar banho**, levante o ajuste de altura e incline a estrutura para trás. Com o encosto reclinado e o suporte para pés estendido, uma posição reclinação confortável pode ser obtida para tomar banho e lavar o cabelo (figura 21b). O profissional de saúde deve ajustar a posição que se adapta às necessidades de cada cliente.



Figura 21a



Figura 21b

Manutenção

Este produto foi desenvolvido e testado para ter uma vida útil de 5 anos quando usado e mantido de acordo com este manual. Os usuários sempre devem verificar se o produto está seguro e utilizável, incluindo manutenção regular e inspeções como especificado no manual.

Para evitar falha estrutural, que pode resultar em lesões graves ou morte:

- Verifique regularmente se este produto apresenta parafusos soltos ou ausentes, fadiga de metal, rachaduras, soldas quebradas, falta de acessórios, instabilidade geral ou outros sinais de desgaste excessivo.
- Não utilize este produto na presença de qualquer condição que possa tornar sua operação não segura.
- Não use componentes ou produtos Rifton para qualquer outra finalidade diferente da prevista.
- Substitua ou repare componentes ou produtos danificados ou que pareçam instáveis.
- Use somente peças de reposição autorizadas Rifton. Informações para pedidos de peças de reposição são fornecidas no verso deste manual.

Limpeza

Após cada utilização, limpe com toalhas desinfetantes ou com uma solução de até 10% de água sanitária.

As cintas com gancho e os fechos podem ser lavados. Encaixe os fechos antes de lavar. Não passe a ferro.

As almofadas de poliuretano são facilmente removíveis para permitir a limpeza e secagem. Elas podem ser limpas com água e sabão ou com um desinfetante suave.

Declaração de garantia

Se um produto Rifton quebrar ou apresentar falhas durante o primeiro ano, faremos a substituição do mesmo gratuitamente.

Materiais 🇺🇸

- As ferragens (porcas, parafusos, etc) são de aço inoxidável.
- Os itens estofados (almofadas, blocos, estofados, etc) são de espuma de poliuretano à prova d'água .
- A estrutura é de alumínio e aço inoxidável, com acabamento em pintura.
- As cintas são feitas de polipropileno com tecido de secagem rápida para o estofamento.
- Os componentes plásticos são moldados a partir de diversas resinas industriais.

Todos os materiais são livres de látex, chumbo e ftalatos.

Modificações do usuário 🇺🇸 🏠 🇺🇸

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para evitar lesões graves ou morte, não modifique ou altere os produtos ou componentes Rifton, ou utilize-os junto com produtos de outros fabricantes. A Rifton não assume responsabilidade por qualquer modificação ou alteração feita aos componentes ou produtos depois que os mesmos saem de nossas instalações. Clientes que modificam ou alteram nossos componentes ou produtos, ou os utilizam com produtos de outros fabricantes, fazem isso por sua conta e risco, visto que não podemos validar a segurança e a eficiência do produto alterado ou modificado.

Informações de contato da Rifton



E-mail
Sales@Rifton.com



Telefone
800.571.8198
9-5 EST



Correio
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



On-line
www.Rifton.com

Para pedir peças de reposição

1. **Localize a ID** do produto na pequena etiqueta branca.
2. Tenha esse número em mãos ao ligar para 800.571.8198 ou para o representante de atendimento ao cliente.

Use somente peças de reposição fornecidas pela Rifton Equipment.

Ficamos satisfeitos em fornecer peças de reposição. Embora a Rifton se esforce para fornecer as peças corretas e instruções para reparar ou reformar seu equipamento, você é responsável por verificar se os reparos ou modificações foram feitos de forma correta e segura.



Encontre cartas de necessidade
médica e artigos informativos em:
www.rifton.com/HTS