

Barra de dirección trasera

Manual del producto R123, R143



Barra de dirección trasera



⚠ PRECAUCIÓN Figura 2a: Para evitar pillarse o aplastarse los dedos, asegúrese de que quede suficiente espacio entre el manillar y la barra de empuje (C) en los giros hacia la izquierda. No use el manillar en una posición muy baja si la barra de apoyo (A) está alta.

Recomendaciones de uso:

Figura 2b: La barra de dirección trasera permite al cuidador guiar el triciclo desde atrás.

Antes de montarla, revise los números del tamaño que hay en el tubo corto de la barra de dirección trasera, para asegurarse de que esta sea del tamaño correcto para el triciclo (R120, R130 o R140).

Montaje:

Figura 2b:

La abrazadera (F) no se puede montar si el manillar está en la posición más baja. Una vez que la abrazadera esté en su lugar, el manillar se puede bajar completamente.

1. Monte la barra de apoyo (A) en los tubos del respaldo. El canal de la abrazadera y el pomo giratorio ovalado (B) deben mirar hacia atrás.
2. Encaje a presión la barra de empuje (C) en el anillo para la guía (D).
3. Utilice el pomo de la abrazadera (E) para abrir la abrazadera (F) y luego colóquela sobre el tubo en U de la barra del mango y apriétela.

Ajustes:

Figura 2b: Para subir o bajar la barra de apoyo (A), afloje el pomo (B), póngala en la posición deseada y vuelva a apretar el pomo (B).



Figura 2a



Figura 2b

ADVERTENCIA



- Consulte los mensajes de seguridad importantes e instrucciones del usuario completas en el manual de producto del triciclo de Rifton.
- Lea atentamente y comprenda la información de esta manual del producto antes de intentar utilizar el producto. La falta de seguimiento de los procedimientos y las instrucciones de este manual del producto puede causar lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está previsto para usuarios de juicio inestable, por lo que en todo momento se requiere la supervisión de un adulto.
- Para prevenir fallos estructurales que provoquen lesiones graves o la muerte:
 - Inspeccione periódicamente este producto y sus accesorios en búsqueda de aflojamiento o ausencia de tornillos, inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.

Modificaciones del usuario

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o componentes de Rifton, ni utilice productos o componentes de Rifton combinados con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de las posibles modificaciones o alteraciones realizadas en nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Los clientes que modifiquen o alteren nuestros componentes o productos o los utilicen junto con productos de otros fabricantes, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Declaración de garantía

Si un producto Rifton se avería o no funciona durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Mantenimiento

Este producto está diseñado y probado para una vida útil de 5 años si se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. Los usuarios deben, en todo momento, asegurarse de que el producto permanece en condiciones seguras y utilizables, lo que incluye el mantenimiento y las inspecciones regulares que se especifican en este manual.

Para prevenir fallos estructurales, que pueden provocar lesiones graves o la muerte:

- Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
- No use los componentes o productos de Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Sustituya o repare los componentes o los productos que estén dañados o que parezcan inestables.
- Utilice solo repuestos autorizados de Rifton. La información sobre pedidos de piezas de recambio figura en la contraportada de este manual del producto.

Materiales

- Los artículos metálicos de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) son de acero galvanizado.
- El chasis es de acero y aluminio, con acabado de pintura al horno.
- Los componentes plásticos se moldean por inyección a partir de diversas resinas industriales.

Ningún componente contiene plomo ni látex de goma natural.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie la barra de dirección trasera con toallitas desinfectantes o una solución con el 10 % de lejía como máximo. No utilice cantidades excesivas de agua.


IMPORTANTE

Guarde esta manual del producto para futuras consultas. Hay copias adicionales disponibles en <http://www.rifton.com/customer-service/product-manuals>.

Claves para los usuarios

Use esta clave para determinar qué secciones de este manual del producto son importantes para usted.

 **Usuarios técnicos** Para profesionales que piden y montan productos Rifton.

 **Usuarios domésticos** Para cuidadores que usan productos Rifton regularmente.

 **Personal de mantenimiento** Para cualquier persona responsable del mantenimiento o de pedidos repetidos de productos y piezas Rifton.

Información de contacto de Rifton



Correo electrónico
Sales@Rifton.com



Teléfono
800.571.8198
9-5 EST



Correo postal
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



En línea:
www.Rifton.com

Para pedir piezas de recambio

1. **Localice el número de identificación** del producto en la pequeña etiqueta blanca.
2. Tenga este número a mano cuando llame a su representante del servicio de atención al cliente al **800.571.8198**.

Utilice solo piezas de recambio suministradas por Rifton Equipment.

Nos complace suministrarle piezas de recambio. Aunque Rifton hace todo lo posible por suministrar piezas e instrucciones correctas para la reparación o renovación de su equipo, usted es responsable de garantizar que todas las reparaciones o modificaciones se realicen de forma correcta y segura.



Podrá encontrar cartas de necesidad médica y artículos informativos en:
www.rifton.com/trike